

NOTE INFORMATIVE

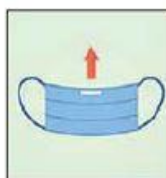
Come si indossano le mascherine

**Step 1:**

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina

**Step 2:**

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi

**Step 3:**

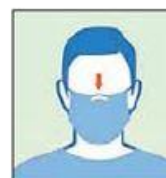
Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto e la parte colorata verso l'esterno

**Step 4:**

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie

**Step 5:**

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento

**Step 6:**

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance

Come si tolgono le mascherine

**Step 1:**

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina

**Step 2:**

Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata

**Step 3:**

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie

**Step 4:**

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla

**Step 5:**

Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente

**Step 6:**

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina